

ALTA FRECUENCIA PROFESIONAL

La Alta Frecuencia

Son cadenas eléctricas y oscilaciones que intercambian de sentido constantemente y producen calor. Este efecto se da dentro de una cánula de vidrio cargado de gas neón. La descarga eléctrica que genera el electrodo sobre la piel transforma el oxígeno del ambiente en **ozono** que garantiza la asepsia del área que fue aplicada. Es un inhibidor de bacterias.

El calor generado causa el aumento del flujo sanguíneo y por tanto una mayor oxigenación de la piel.

Beneficios:

Los efectos térmicos de la alta frecuencia crean sobre la piel energía en forma de calor que aumenta la vasodilatación y la oxigenación celular.

Es útil como cauterizador, tratamientos antiacné, control sebáceo del rostro, evita la proliferación de bacterias, desinflamante, bactericida y estimulante del crecimiento capilar. Asimismo es un activador de la dermis y la epidermis

- Disminuye la inflamación de la zona
- Acelera la curación y cicatrización de la piel
- Aumenta la circulación sanguínea de la zona tratada
- Nutre la epidermis.

Modo de empleo:

Se aplica luego de la extracción en las limpiezas faciales con la piel totalmente seca y limpia.

Los electrodos se pueden utilizar muy cerca a la piel, lo que genera el efecto bactericida o, pegándolo a la superficie de la piel con lo que se genera el incremento de temperatura y vasodilatación.

Tipo de Electrodos:

El electrodo cuchara se utiliza para la zona de nariz, labios y contorno de ojos

El electrodo puntual se usa como cauterizador para tratamientos de acné y capilares

El electrodo champiñón es para la zona de rostro y cuello

El electrodo de peine se usa para tratamientos de alopecia.

Embalaje: 33x21x6cm

G. W: 0.7kg

Voltaje: 110V/220V

Potencia: 8W

