

## BALON CARBOXITERAPIA DE 5 KG CON CALENTADOR

Equipo de 5 kilos especial para gas Co2. Viene con manguerilla, filtro bacteriológico, válvula neonatal de medición de salida de Co2 para evitar el dolor, viene con carrito.

El Co2 se aplica en el tejido subcutáneo por medio de una aguja muy fina. Dicha aplicación se efectúa con un equipo que pueda controlar la salida del gas con una presión constante durante un tiempo determinado. Tras la aplicación del dióxido de carbono en la piel, el especialista dará un ligero masaje en la zona para que este circule y se distribuya. El Co2 utilizado debe ser de tipo medicinal y con un 99% de pureza.

La carboxiterapia se realiza con un equipo especialmente preparado que regula el tiempo de inyección y monitoriza la dosis de dióxido de carbono administrado.

- No aplicar en personas con problemas hepáticos
- No aplicar en pacientes con problemas respiratorios, cardiacos o renales.
- No aplicar en pacientes con cáncer ni diabetes
- No aplicar en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o con el período.
- La aplicación del Co2 debe ser aplicado o monitoreado por personal especialmente capacitado y entrenado para esta técnica.
- El paciente puede sentir dolor en la zona en la que se realizan los pinchazos. También es posible que sienta hormigueos, sensación de calor y frío, o que aparezcan hematomas en la piel tras la aplicación de la carboxiterapia.