

LAMPARA WOOD

Características

1. Puede emitir eficazmente rayos ultravioleta de onda larga modulados en la capa media de la dermis de la piel para identificar la salud y las condiciones inusuales de la piel o detectar las imperfecciones en la piel normalmente invisibles a simple vista.
2. Una herramienta de diagnóstico útil y práctica Utilizada en dermatología para observar cualquier fluorescencia posterior de la piel, lo que permite al esteticista llevar a cabo el plan de tratamiento.
3. Adopta material ABS de alta calidad en mano de obra delicada, y el mango suave y ergonómico permite un agarre cómodo y seguro.

Función:

- 1) Detección de enfermedades anormales del pigmento, como el Diagnóstico auxiliar del viento de cicatriz blanca y el juicio del efecto curativo, la determinación de la clasificación del cloasma, etc.
- 2) Detecta infecciones de la piel, guía el diagnóstico clínico temprano de las infecciones de rosácea y ayuda en el diagnóstico de infecciones fúngicas del cabello;
- 3) Diagnóstico auxiliar de foliculitis pityrosporum, etc.;
- 4) Detección de enfermedades anormales del metabolismo de la porfirina;
- 5) Evite la medicación excesiva en la molienda química;
- 6) Monitorizar la eficiencia de la medicación local;
- 7) Diagnóstico fotodinámico de medicamentos, etc.

Analizador 'sLAMP presenta una condición de piel

Analizador 'sLampIndicationShin Condition

Azul, blanco, piel normal y saludable

Piel hidratada fluorescente brillante

Púrpura Fluorescente Piel fina sin suficiente humedad

Piel deshidratada violeta claro

Amarillo o a veces Áreas aceitosas de la cara y Comedones

Pigmentación marrón y manchas oscuras

Manchas blancas Capa de piel y células muertas

Capa de conio gruesa fluorescente blanca

Instrucciones de uso:

1. Limpie la cubierta protectora y la lente: Al limpiar, asegúrese de que el agente de limpieza no dañe la pintura y el plástico para garantizar la máxima salida de luz.
2. Limpie la superficie de la piel antes de su uso.
3. Coloque el protector de luz de imitación, conecte el cable de alimentación de la lámpara de madera a la fuente de alimentación y presione el interruptor.
4. Al usar la lámpara de madera, es apropiado mantener el instrumento a una distancia de 5-6cm de la superficie de la piel del paciente.
5. Detecta a través de una lupa en una habitación oscura formada por un escudo de luz.