

MAGNETOTERAPIA MEDITEA MAGNETHERP 330

CARACTERÍSTICAS

Posee cuatro canales de salida, para la utilización simultánea de hasta cuatro accesorios, lo que permite la actuación en distintas partes de un mismo paciente, o en distintos pacientes en forma simultánea. Asimismo dispone de temporizador de 30 minutos, para control de la sesión.

Cuenta con 5 programas preestablecidos para seleccionar por afección y la posibilidad de configurar su propio protocolo mediante la elección entre cuatro opciones de frecuencias, la posibilidad de optar por un barrido de frecuencias, la modalidad continua o pulsante, la intensidad del campo y el tiempo, brindando así incontables modalidades de trabajo, lo que hace al MAGNETHERP330NG un equipo muy versátil para adaptar la aplicación a la necesidad individual.

Incluye microprocesador que compensa automáticamente intensidades de salida de acuerdo al accesorio actuante. Su nueva pantalla Touch Screen, intuitiva y de fácil operativa, va guiando al profesional e informa del estado del tratamiento implementado, así como también facilita notablemente la selección de parámetros.

FUNCIONAMIENTO

Equipo emisor de campo electromagnético, con una potencia de campo de hasta 200 Gauss en emisión continua o pulsante y circuito de frecuencia regulable.

El principal campo de acción de la terapia por campos electromagnéticos es la fisioterapia y rehabilitación, siendo algunas de sus principales indicaciones:

- Dolores, edemas y traumatismos en general de: articulaciones, ligamentos y músculos en procesos agudos y crónicos (esguinces, luxaciones, artrosis, artritis, contracturas, etc)
- Disfunciones circulatorias (varices, flebitis, linfedemas, etc.)
- Acelerador de la consolidación ósea (fracturas)
- Activador en la regeneración de lesiones de la piel (heridas, úlceras, eczemas, llagas, etc)
- Nervios lesionados (acorta tiempo de reinervación)