

PUNTA DE DIAMANTE PROFESIONAL

Microdermoabrasión con Punta de Diamante

Ideal para la renovación facial consiste en una descamación suave de la primera capa de la piel del rostro . Potente equipo que marca el nivel de succión. Viene con 3 mangos y 9 puntas intercambiables según la zona en que se va a hacer el tratamiento.

Peeling mecánico de alta precisión cuyo objetivo es estimular la renovación celular por medio de una exfoliación en la piel del rostro.

Este equipo trabaja a través de una succión controlada y gracias a los micro cristales produce en la piel una descamación dejándola suave y fresca al eliminar la primera capa córnea de la piel quedando lista para la extracción de impurezas o puntos negros. Es importante aprovechar este peeling para incluir tratamientos de hidratación o renovación posteriores a la limpieza.

No sólo se utiliza en zona del rostro sino también para suavizar cicatrices, para aclaramiento de axilas, de codos o rodillas.

Usos y aplicaciones:

Se usa para disminuir las arrugas y líneas de expresión finas, disminuir la queratosis, atenuar los poros dilatados, disminuir las pigmentaciones superficiales, las cicatrices de acné de forma leve y estimular la renovación celular.

La frecuencia de las sesiones con microdermoabrasión son de 1 vez por semana o cada quince días dependiendo de la sensibilidad de la piel. Se recomienda entre 5 u 8 sesiones para obtener buenos resultados.

El tratamiento se complementa con mascarillas hidratantes o ampollas que se pueden ingresar con mesoterapia o aparatología como radiofrecuencia, ultrasonido o electroporación.

Es un procedimiento que dura entre 20 ó 30 minutos, no es doloroso y es muy importante usar un buen bloqueador después de la sesión. La paciente no debe exponerse directamente al sol después de las sesiones.

Este procedimiento elimina los desechos de la piel, imperfecciones, manchas, arrugas y pigmentación no deseada en la piel. El uso moderado de dermoabrasión diamante, acompañada con productos para la piel que penetran a través de la capa superior de la piel que alcanza el nivel de la dermis, ayuda a reponer los nutrientes naturales, restaurar la actividad celular y promover la salud de la piel.

Los resultados después del tratamiento Micro dermoabrasión es generalmente una piel sana y brillante.

Este equipo además es un 3 en 1 ya que además de la punta de diamante viene con 3 accesorios de vidrio para hacer vacuum facial y dispositivo de spray para aplicar un rocío fino con lociones tónicas.