

VENTOSAS PARA TERAPIA FISICA

Características de las ventosas:

1. Material de buena calidad: material saludable e inofensivo, fuerte y duradero, no se rompe fácilmente, hermoso y fácil de llevar.
2. Funcionamiento individual: El tanque está conectado con una bomba de aire de vacío y un tubo de extensión, que puede ser operado por una persona de forma inmediata, cómoda y rápida.
3. Succión al vacío: no se necesita fuego, evita el riesgo de quemaduras, seguro y protegido.
4. Flexible y transparente: el tanque es azul claro transparente, la presión negativa dentro del tanque se puede ajustar a voluntad, fácil de observar el área de tratamiento.
5. Sello de seguridad: el extremo del tanque es redondo, liso, redondo, gran contacto con la piel, buena estanqueidad al aire, no se cae fácilmente.
6. Especificaciones completas: el tanque está dividido en 6 modelos, el tamaño es adecuado, adecuado para todas las partes del cuerpo humano.

Cómo usar la Ventosa:

1. Antes de usar, primero levante el extremo superior del tanque para asegurarse de que el gas esté desbloqueado.
2. Después de colocar la boquilla de bombeo de vacío en el extremo superior del tanque, tire de la varilla verticalmente unas 4 veces para alcanzar la presión negativa adecuada.
3. Use el extremo del tanque, levante suavemente el extremo superior del tanque y el tanque se puede quitar.
4. Menos partes de los músculos humanos o pies peludos, las articulaciones se pueden usar para hacer un donut debajo del tanque para lograr un efecto de sellado.

Paquete incluido:

- 1 Juego de ventosas de 12, 20 O 24 piezas
- 1 Bomba de ventosas
- 1x tubo de extensión
- 2 cabezales magnéticos
- 1 manual